



nazwa: [Beaphar Tick Pen do łatwego usuwania kleszczy](#)

marka: **Beaphar**

cena: **25.00 zł**

Tick Pen - Narzędzie do usuwania kleszczy Tick Pen od Beaphar pozwala w łatwy, bezpieczny i delikatny sposób, usunąć w całości kleszcze przyczepione do skóry. Kleszcze mogą być nosicielami niebezpiecznych patogenów, wywołujących kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę i babeszjozę psów. Jeśli kleszcz jest ściskany przy nieumiejętnym usuwaniu go, pojawiają się „wymioty” u kleszcza, które zwiększają prawdopodobieństwo zainfekowania żywiciela, gdyż właśnie wtedy treść z patogenami, z wnętrza kleszcza, dostaje się do rany ofiary.

□ Poręczne narzędzie, które na obu końcach posiada dwa rozmiary szczypiec - do usuwania małych i dużych kleszczy. Sposób użycia 1. Odsunąć czerwoną osłonę zabezpieczającą końcówkę szczypiec. 2. Ustawić końcówkę szczypiec równoległe do powierzchni skóry w pobliżu kleszcza. 3. Wsunąć szczelinę szczypiec pomiędzy kleszcza a powierzchnię skóry. 4. Ostrożnie unieść szczypce, usuwając kleszcza. Należy dokładnie zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza. Zaleca się bacznie obserwować miejsce pokąsania. Jeśli zaobserwuje się zaczerwienienie w kształcie pierścienia wokół tego miejsca, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Polecamy: W przypadku gdy doszło do pokąsania, możliwe jest sprawdzenie, przy pomocy Beaphar Tick Test, czy atakujący kleszcz jest nosicielem niebezpiecznych bakterii Borrelia. Beaphar Tick Test może być wykorzystany do zbadania kleszczy, które zaatakowały zarówno ludzi jak i zwierzęta. □