



nazwa: [Podłoże Katkor do pobierania próbek moczu](#)

marka: **Protexin Veterinary**

cena: **18.50 zł**

Katkor jest to nowy, niezawodny sposób, aby zdiagnozować kamicy moczową. Katkor doskonale nadaje się do zbierania próbek moczu. □ W opakowaniu znajduje się pipeta i pojemnik na próbkę moczu. Rozpoznanie typu kamicy jest ważne, □ aby wybrać właściwą dietę leczniczą dla kota. Katkor oferuje więcej: □ Katkor może być wykorzystywany do pobierania próbek moczu, białka, glukozy, acetonów krwi i analizy masy. □ KatKor nadaje się również do pobierania próbek kału dla analizy jaj pasożytów i markerów fermentacyjnych. Gwarancja Katkor Badania AZU (Szpital Akademicki w Utrechcie, Holandia) wykazały, że KatKor w żaden sposób nie wpływa na poziom pH, poziom białka lub białe / czerwone krwinki w moczu (1996, projekty FL). Badania wykazały, że granulki nie absorbują lub emitują wapnia, magnezu i fosforanu (Z. Versuchstierkd 1990; 33; 259-263). Instrukcja użytkowania: 1. Wyczyść dokładnie kuwetę. Spłukaj czystą, letnią wodą, aby usunąć pozostałe ślady środka czyszczącego. Wysusz kuwetę za pomocą papieru kuchennego lub papieru toaletowego. 2. Nasyp podłoże KatKor na środek kuwety i odłóż ją do pierwotnej lokalizacji. □ 3. Kał powinien być usunięty natychmiast, aby uniknąć zanieczyszczenia moczu. 4. Próbkę moczu należy zebrać jak najszybciej po oddaniu moczu. Aby to zrobić, ściśnij zawór powietrza na końcu dołączonej pipety i przechyl kuwetę na jednym rogu. Umieść pipetę w tym rogu, a następnie możesz zebrać mocz zwalniając zawór powietrza. □ 5. Przenieś mocz do pojemnika na to przewidzianego i dostarcz do weterynarza jak najszybciej. Szybkość jest ważna, gdyż kompozycja moczu i tworzenie kryształów może się zmieniać w trakcie długiego przechowywania. 6. Jeśli Twój kot nie reaguje na małą ilość podłoża KatKor w kuwecie, można zastosować dwa worki KatKor. Jednak do analizy wymagane jest tylko 1-2 ml moczu. Jeden worek KatKor wystarcza na 7 ml moczu kota. Koty wytwarzają średnio od 35 - 80 ml □ □ (w żywieniu suchą karmą), do 80 - 120 ml. Kot z infekcją pęcherza wydała tylko kilka kropel moczu przy jednej wizycie w kuwecie. W takich przypadkach pobieranie próbki będzie trwać od 1 - 2 godzin do zebrania wystarczającej ilości moczu. Mocz zbierany w tym czasie nie może być przechowywany w lodówce. 7. Jeśli kot nie chce korzystać z podłoża KatKor, jego zwyczajowy żwirek może być umieszczony w rogu kuwety, aby znajomy zapach zachęcił kota. Jest jednak ważne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia próbki przez normalne granulki. Metoda ta powinna być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach.